

歯科材料 06 歯科用印象材料  
一般医療機器 歯科咬合採得用材料 JMDN 70883000

## スプリントレイ トライイン 2

### 【禁忌・禁止】

- 本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある医療従事者の使用及び当該既往歴のある患者への使用はしないこと。

### 【形状、構造及び原理等】

- 形状  
乳白色の液状。
- 原理  
スキャンされた3D画像と3Dプリンターとを組み合わせ、造形される光重合性の樹脂材料である。

### 【使用目的又は効果】

クラウン、ブリッジ、義歯等を作製するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録する材料。

### 【使用方法等】

- 使用方法
  - 本品を上下に十分に振った後、3Dプリンターのレジタンクに注ぎ入れる。
  - 3Dプリンターの取扱説明書に従い、造形物の出力を行う。
  - 出力物を3Dプリンターより取り出し、洗浄を行う。
  - 洗浄後、造形物の支持台を除去し追加硬化させる。
  - ブラシを使用して石鹸とぬるま湯で造形物の洗浄を行う。
- 使用方法に関する使用上の注意
  - 本品は環境光（日光や蛍光灯）の影響を受けるため、使用後は直ちにボトルのキャップを閉めること。また、取り出した材料は直ぐに使用すること。
  - レジタンクに残った本品は、濾過して元のボトルに戻すこと。
  - 使用期限が過ぎた本品は使用しないこと。光重合開始剤が適切に作用せず、造形物の安定性が損なわれる可能性があります。

### 【使用上の注意】

- 使用上の注意
  - 本品は換気の良い又は換気設備を備えた場所で、常温で使用すること。
  - 本品の使用時には保護メガネ、手袋等、適切な保護具を着用すること。

### 2. 重要な基本的注意

- ①本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療従事者、及び当該既往歴のある患者には、本品を使用しないこと。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。
- ②本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ③本品は皮膚に付着しないように注意すること。万一皮膚に付着した場合には、直ちに多量の流水と石鹸で洗浄し、専門医の診察を受けること。
- ④本品は呼吸器系に刺激を与えるため、本品や本品の蒸気又は研削屑を吸い込まないようにすること。また、頭痛、めまい、吐き気、呼吸困難等の重篤な症状を伴う場合は、すぐに医師の診断を受けること。
- ⑤未重合の本品を口腔内に入れないこと。本品を飲み込んだ場合は、多量の水または牛乳を飲ませてすぐに医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### （保管方法）

15℃～25℃で直射日光を避ける。

#### （有効期間）

容器に記載されている使用期限までに使用すること。  
（使用期限は自己認証[当社データ]による。）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 株式会社 **スプリントレイ**

住所：〒110-8507  
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

画像情報部

電話番号：03-3845-2925

FAX番号：03-3845-2926

製造元：スプリントレイ

SprintRay Inc. (アメリカ合衆国)